




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Løfteenhed til bordplade, manuelt højderegulérbar RK1181
Produktbeskrivelse	EAN: 5708590293806 HMI: 61269  Navnet INDIVO relaterer til produkternes individuelle konfiguration. Manuel løfteenhed til fritstående bord. Til bordplader på 1400 - 2000 mm. 300 mm højderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, længde- og tværprofiler samt håndsving.. Pressalit anbefaler udhæng på 200 mm i begge ender af bordet for at gøre plads til kørestolsbrugeren.
Justerbarhed Produktkapacitet	Højderegulérbar Maksimal belastning (jævnt fordelt): 100 kg inkl. bordplade.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

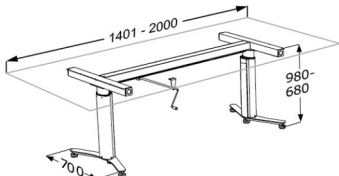

Produkt	Løfteenhed til bordplade, manuelt højderegulérbar
Varenummer	RK1181
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

Produkt	Løfteenhed til bordplade, manuelt højderegulérbar
Varenummer	RK1181

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®