



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem, voor vloerafvoer R8012000
Kleur	Wit
Beschrijving	VVS:617991100 NRF:6191041 EAN:5708590345291 HMI: 105967  Het doel is om het voor gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken om bij dagelijks gebruik op en af het toilet te komen. Het doel is ook om het werk van de verzorgende te vereenvoudigen en het proces comfortabel en waardig te maken voor de gebruiker. SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem, 300 mm handmatig in hoogte verstelbaar, met hendel. Incl inbouwreservoir met dubbel spoelsysteem 3/6 liter. Wandcloset plus toiletzitting afzonderlijk te bestellen. Voor vloerafvoer. Materialen: Geanodiseerd aluminium en polystyreen(PS) Excl. bevestigingsmateriaal.
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte verstelbaar 300 mm Maximale gebruikersbelasting: 200 kg. Maximale belasting 235 kg.(gebruikersbelasting+accessoires). Wanneer de toiletlift wordt belast met 235 kg, wordt elke muurbevestiging belast met 65 kg. De toiletlift wordt statisch getest met 600 kg, wat een vereiste is volgens de de toegepaste normen voor hulpmiddelen. Houd er rekening mee dat de meeste wandclosets welke compatibel zijn met deze toiletlift, zijn getest tot 400 kg.
Materialen Ergonomy	Geanodiseerd aluminium. De frontplaten zijn gemaakt van polystyreen (PS).De bovenplaat en compact laminaat. <i>Ontvlambaarheid getest (ISO 8191-1 en ISO 8191-2). Testrapport beschikbaar.</i> SELECT hoog-laag toiletsystemen zijn verkrijgbaar in die verschillende kleuren welke harmoniëren met moderne badkamers, wat resulteert in een comfortabele en fraaie toiletomgeving. Een minimum aan groeven, sleuven en openingen maakt het reinigen snel en effectief en resulteert tevens in een aantrekkelijk en exclusief ontwerp



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem, voor vloerafvoer R8012000
Functie	Het toilet kan omhoog en omlaag versteld worden met de draaihendel. Deze hendel kan aan weerszijden van het toiletsysteem worden geplaatst- zonder gereedschap. Het is mogelijk de hoogte van het toiletsysteem aan te passen door hoogte van boorgaten anders te positioneren als alternatief voor de draaihendel. Het toilet is 300 mm in hoogte verstelbaar, van 425 mm tot 725 mm, zodat de hoogte altijd perfect kan worden aangepast aan de behoefte van de gebruiker.
Garantie Reiniging	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum. Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreinigiger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.



PRESSALIT®

Product	SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem, voor vloerafvoer
Artikelnummer	R8012000
Conformiteits verklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in: - Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Machinerichtlijn 2006/42/EEG



PRESSALIT®

Product	SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem, voor vloerafvoer
Artikelnummer	R8012000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem, voor vloerafvoer R8012000		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

pressalit.com