




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	MCT 3 mobile Ankleideliege, elektrisch höhenverstellbar R9632721000
Farbe Produkt- beschreibung	VVS: 777542320 EAN: 5708590389943 HMI: 139822 Weiß  Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer. MCT 3 mobile Ankleideliege, 700 x 1900 mm, zwei umklappbare Seiten. Elektrisch höhenverstellbar mit Kabelfernbedienung. 500 mm Hubbereich von 450 bis 950 mm. Matratze muss separat bestellt werden.
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität Aufwärtsgeschwindigkeit	Höhenverstellbar 500 mm Maximales Anwendergewicht (MUM): 200 kg. Maximale Belastung (SWL): 205 kg. <i>Die Pflegeliege ist mit 512,5 kg statisch getestet, gemäß den Anforderungen der Norm IEC 60601-1, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 erfordert.</i> Geschwindigkeit aufwärts: 17 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 17 mm/s

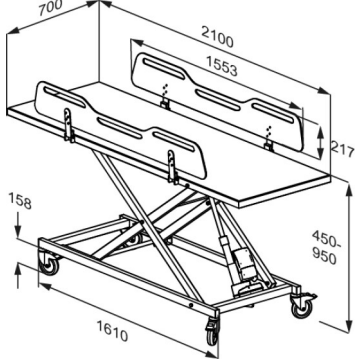

Produkt	MCT 3 mobile Ankleideliege, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R9632721000
Geräusch	50 dB
Materialien	Materialien: Kunststoff, Kompaktlaminat und lackierter stahl.
Ergonomie	• Die ergonomisch geformten Seitengitter der mobilen Ankleideliege haben ein praktisches niedriges Mittelstück, welches dem Pflegepersonal einen besseren Zugang und eine bessere Arbeitsumgebung bietet, während die zu pflegende Person auf den Duschwagen versetzt, gewechselt und angezogen werden kann. • Durch die einhändig bedienbaren Seitengitter kann der Betreuer während des gesamten Vorgangs sowohl Augenkontakt als auch physischen Kontakt mit dem Benutzer aufrechterhalten. Die klappbaren Seitengitter bieten einen einfachen Zugang von allen vier Seiten des Duschwagens. • Die verschiedenen Griffmöglichkeiten am Seitengitter ermöglichen es dem Benutzer sich beim Wenden daran festzuhalten. Das gibt dem Benutzer Sicherheit und fördert das Wohlbefinden und die Selbständigkeit bei der Pflege im Duschwagen. • Die leicht zu reinigenden, glatten Kontaktflächen verhindern, dass sich Schmutz ablagert und Bakterien ansammeln.
Funktionen	• Der Ankleideliege kann für einen einfachen Transport und mehrere Benutzer von Raum zu Raum bewegt werden. • Intuitive, benutzerfreundliche Dropdown-Seitengitter mit einhändiger Bedienmöglichkeit.
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA40 (Linak) IPX6
Steuerkasten	CA30 (Linak) IPX6
Kabelgebundener Fernbedienung	HB30 (Linak) IPX6
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 330 W Stromverbrauch, standby: 0,5 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. HINWEIS Wenn das Gerät in einer Umgebung mit hohem Salz- oder Chlorgehalt der Luft platziert wird, verkürzt sich der Garantiezeitraum von 3 Jahren auf 1 Jahr. Salz und Chlor wirken korrosiv auf die Komponenten des Geräts und verkürzen dadurch dessen Lebensdauer.



PRESSALIT®

Produkt	MCT 3 mobile Ankleideliege, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R9632721000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist produziert worden gemäß: - Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.



PRESSALIT®

Produkt	MCT 3 mobile Ankleideliege, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R9632721000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®